

arseptum⁺ WIPES

Longtime shelf life



CHEMIE AG
WIR PFLEGEN, WAS SIE LIEBEN!

BIO WIPES TÜCHER

Bestätigter Oberflächenschutz

- Bakterizid
- *S. aureus* (MRSA)
- *Escherichia ATCC 8739*
- Viruzid (z.B. Covid-19)

Technische Daten

- Dichte [20°C]: 30,93 g/cm
- pH-Wert [1%ig]: 6-7,5
- Flammpunkt [°C]: 35~47

Zulassungs-Nr.: CHZN7157

CPID: 859337-56

ARSEPTUM LONGTIME SHELF LIFE OBERFLÄCHEN-DESINFEKTIONS-LÖSUNG

Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten wie beispielsweise Behandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen, sowie andere Flächen wie z.B. Tische, Türklinken usw.

- High-tech-float, geprüfter, elementarer Microrohstoff
- Mit VE-Wasser und Teebaumöl
- Grosse Wirkung gegen behüllte Viren (Noroviren), Bakterien und Hefepilze
- Geruchsneutralisierend
- Labor Prof. Dr. G. Enders: Zertifikat EN 14476:2019-10, EN 1276:2019, EN 1650:2019, EN 13697:2015+A1:2019

INHALTSSTOFFE

- Bio Ethanol (83.0g / 100g)
- VE Demineralisiertes Wasser (15.0g / 100g)
- high-tech-float, einzigartiger und geprüfter, elementarer Microrohstoff
- Konsistenz und naturbelassene Gerüststoffe
- ätherische Öle (wie Teebaumöl)

EINWIRKZEITEN

Einwirkzeit der Tränklösung getestet:

- Standardbakterien, Hefe, behüllte Viren (bakterizid, levurozid)
30 Sek. hohe Belastung
- Noroviren
60 Sek. hohe Belastung

arseptum⁺
Longtime shelf life

eco

**Oberflächen-
Desinfektionslösung**

*Solution désinfectante
pour les surfaces*

1000 ml

**SWISS
MADE**

Icons: Disinfection, Eco, Safety, and other symbols.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Tücher. Oberfläche mit dem getränkten Tuch sorgfältig wischen und einwirken lassen. Die Fläche sollte während der Einwirkzeit feucht bleiben. Auf vollständige Benetzung achten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen und die Fläche allenfalls vorreinigen. Nach Gebrauch Verpackung wieder gut verschliessen. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen Medizinprodukten. Desinfizierbare Fläche von ca. 0.8 bis 1.0 m² pro Tuch. Bei der Anwendung wird das Tragen von geeigneten Handschuhen empfohlen.

BEFÜLLUNG

Eimer ist wieder verwendbar. Vor Nachfüllung gründlich reinigen. Befüllung wie folgt vornehmen:

- Deckel abnehmen
- 2 Liter arseptum Longtime in den Eimer einfüllen
- Tuchrolle einsetzen
- Innentuch durch die sternförmige Öffnung ziehen
- Deckel schliessen
- 30 min einziehen lassen



Achtung / Attention

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Bei Kontakt mit den

Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Inhalt/Behälter mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktinformation lesen. Vor Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Haltbarkeit: Nach dem Öffnen 28 Tage.



CHEMIE AG

WIR PFLEGEN, WAS SIE LIEBEN!

Chemie AG
Alte Tiefenastrasse 4d
Postfach 10
3048 Worblaufen

Tel. +41 31 917 44 22
Fax +41 31 917 44 20

info@chemieag.ch
www.chemieag.ch



Hersteller von arseptum Longtime shelf life

rama⁺
HOLDING AG

SIND NOCH FRAGEN OFFEN GEBLIEBEN?

Unser geschultes Fachpersonal im Innendienst hilft Ihnen
gerne weiter – kontaktieren Sie uns.